

JEDNA warstwa – ZERO pomyłek

OliEtch Bond to jednoskładnikowy, jednowarstwowy system wiązający VII generacji. Powstał z myślą o maksymalnym uproszczeniu procedury, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości i pewności wiązania. Jest niewrażliwy na stosowaną technikę pracy i eliminuje wszelkie ewentualne błędy proceduralne.


GENERACJA
7
GENERACJA




kod: OL003 – buteleczka 5ml

JEDNA procedura w 50 sekund!


Wcześniejsze generacje systemów wiązających wymagają użycia kilku składników/buteleczek i kilku osobnych procedur. W przypadku **OliEtch Bond** wszystkie procedury: wytrawianie, kondycjonowanie i wiązanie odbywają się w jednym etapie, a całość zajmuje jedynie 50 sekund!

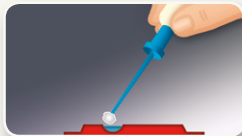


Odmierzyć wystarczającą ilość OliEtch Bond na tackę.

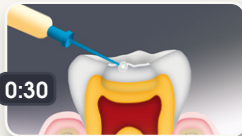

Przy pomocy aplikatora dokładnie wcierać OliEtch Bond w **wilgotne** szkliwo i zębinę przez 30 s.

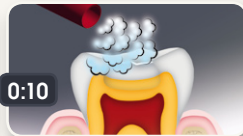

Nadmiary wydmuchiwać strumieniem sprężonego powietrza przez ok. 10 s.

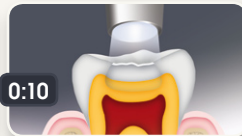

Rozprowadzoną warstwę OliEtch Bond polimeryzować światłem przez 10 s.

WIELE opcji wiązania


OliBond to światłoutwardzalny system wiązący typu Prime/Bond zapewniający mocne wiązanie wszelkich materiałów światłoutwardzalnych z zębina i szkliwem. Po dodaniu OliActivator system zmienia się w wiązący chemicznie lub dualnie, co doskonale sprawdza się w kanale korzeniowym.

Zastosowanie **OliBond** + **OliActivator** z materiałami chemo- i podwójnie utwardzalnymi

max.
2:00



Wytrawić przygotowany kanał korzeniowy 37% roztworem kwasu ortofosforowego przez ok. 1-2 min. Dokładnie wypłukać wytrawiacz dużą ilością wody.

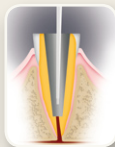


Nadmiary wody usunąć strumieniem powietrza i sączkami papierowymi.
Powierzchnię pozostawić wilgotną.




Odmierzyć równe ilości OliBond i OliActivator i mieszać przez 15 s.

I. 0:30

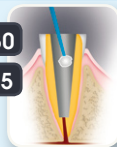

II. 0:15

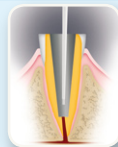

I. Wcierać intensywnie mieszankę OliBond i OliActivator przez 30 s.

Osuszyć przy pomocy sączków papierowych.

II. Procedurę wcierania i osuszania powtórzyć (w II etapie mieszankę OliBond i OliActivator wcierać przez 15 s.)

Zastosowanie **OliBond** z materiałami światłoutwardzalnymi

W przypadku stosowania **OliBond** z materiałami światłoutwardzalnymi naniesioną warstwę **OliBond** (bez OliActivator) należy naświetlić przez 20 s. Przy głębokich ubytkach można nałożyć drugą warstwę **OliBond** i naświetlić jak poprzednią.