




OLIDENT
INNOVATION

OliEtch BOND

JEDNA WARSTWA - ZERO POMYŁEK

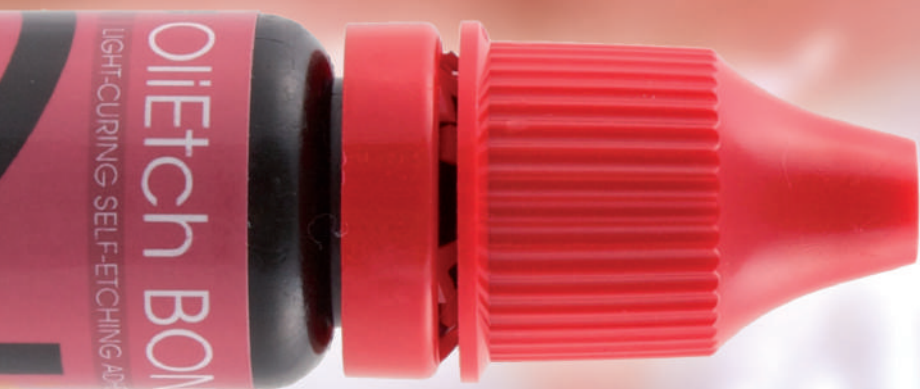

- jednoskładnikowy
- jednowarstwowy
- samowytrawiający
- światłoutwardzalny



OliEtch BOND

JEDNA warstwa – ZERO pomyłek:

OliEtch BOND to jednoskładnikowy, jednowarstwowy system wiążący VII generacji. Powstał z myślą o maksymalnym uproszczeniu procedury, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości i pewności wiązania. Jest niewrażliwy na stosowaną technikę pracy i eliminuje wszelkie ewentualne błędy proceduralne.




kod: **OL003** – buteleczka 5ml

JEDNA procedura w 50 sekund!


Wcześniejsze generacje systemów wiążących wymagają użycia kilku składników/buteleczek i kilku osobnych procedur. W przypadku **OliEtch BOND** wszystkie procedury: wytrawianie, kondycjonowanie i wiązanie odbywają się w jednym etapie, a całość zajmuje jedynie 50 sekund!




Odmierzyć wystarczającą ilość **OliEtch BOND** na tackę.

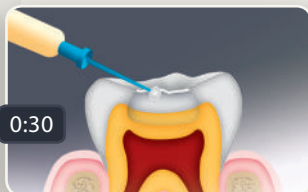

Przy pomocy aplikatora dokładnie wcierać **OliEtch BOND** w wilgotne szkliwo i zębinę przez 30 s.

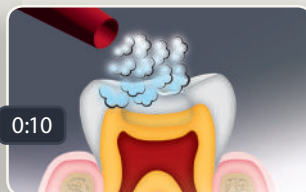

Nadmiar wydmuchiwać strumieniem sprężonego powietrza przez ok. 10 s.

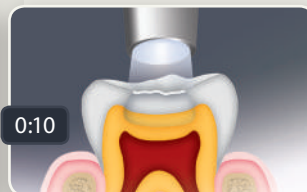


Rozprowadzoną warstwę **OliEtch BOND** polimeryzować światłem przez 10 s.


JEDEN z najmocniejszych – sprawdź i porównaj

Wśród najpopularniejszych systemów samowytrawiających **OliEtch BOND** wyróżnia się doskonałymi wartościami siły wiązania. Wystarczy tylko jedna warstwa **OliEtch BOND**, aby uzyskać silne i długotrwałe połączenie światłoutwardzalnych kompozytów ze szkliwem i zębiną.*

Siła wiązania do szkliwa (Mpa)*

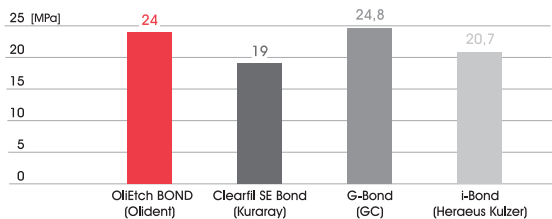

Siła wiązania do zębiny (Mpa)*

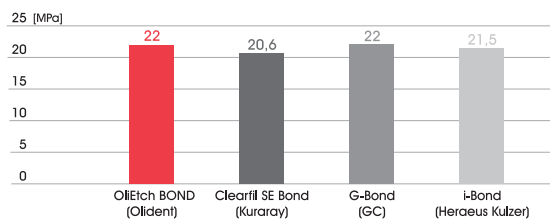

* Badania wewnętrzne przeprowadzone przez producenta; Niemcy, 2011.

JEDYNA TAKA CENA za niemiecką jakość

Znak **German Quality** to gwarancja niezawodnej jakości każdej buteleczki **OliEtch BOND**. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji mamy możliwość zaoferować Państwu ten produkt w wyjątkowej cenie!

O szczegóły zapytaj naszego Przedstawiciela.



Twój Partner handlowy



Dołącz do nas na Facebook'u

OLIDENT

ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com



OLIDENT



EN ISO
13485:2012
+AC:2012



Firma Olident nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.